


LIQUIBAND® FIX8™

Introducción

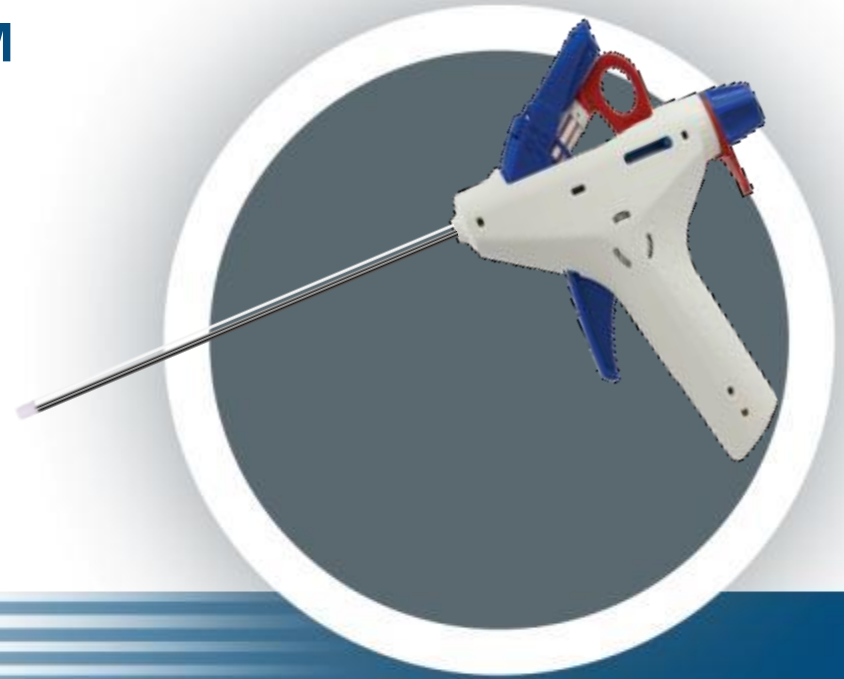

Principales Usos / Mecanismos de aplicación

- Fijación Laparoscópica con malla quirúrgica de todas las hernias abdominales, incluidas:
 - Hernia Inguinal
 - Hernia Abdominal
 - Hernia Incisional
- Aproximación del Peritoneo (aplicable en alrededor del 60% de las intervenciones de hernia con laparoscopia)
- Cuando se aplica a la malla de la hernia, el adhesivo penetra la malla llegando al tejido y polimerizando de forma no invasiva (10 segundos o menos), fijando la malla al tejido subyacente.
- 45 aplicaciones líquidas de precisión con cada dispositivo.
 - Cada aplicación tiene .0125 gramos de adhesivo
- Se clasifica como dispositivo médico implantable.



Ventajas de LIQUIBAND® FIX8™ frente a otras Anclajes (tachuelas) Tradicionales

- Fijación fuerte y segura de la malla
- Aplicación precisa y controlada
- Aplicador fácil de usar
- No se necesita fijación angular
- Aplicación rápida (10 segundos)
- Sin trauma mecánico
- El nervio no puede quedar atrapado



Fuerte

Mayor tensión/fuerza de sujeción



Preciso

Aplicación precisa y controlada



Segura

Fijación no invasiva



LIQUIBAND® FIX8™

Preparación del Dispositivo

Poner la punta de la cánula en el deposito de la bandeja de embalaje, y rellenar (cargar) el dispositivo apretando el gatillo (pulsador) tres veces o hasta que salga una gota de adhesivo.

